


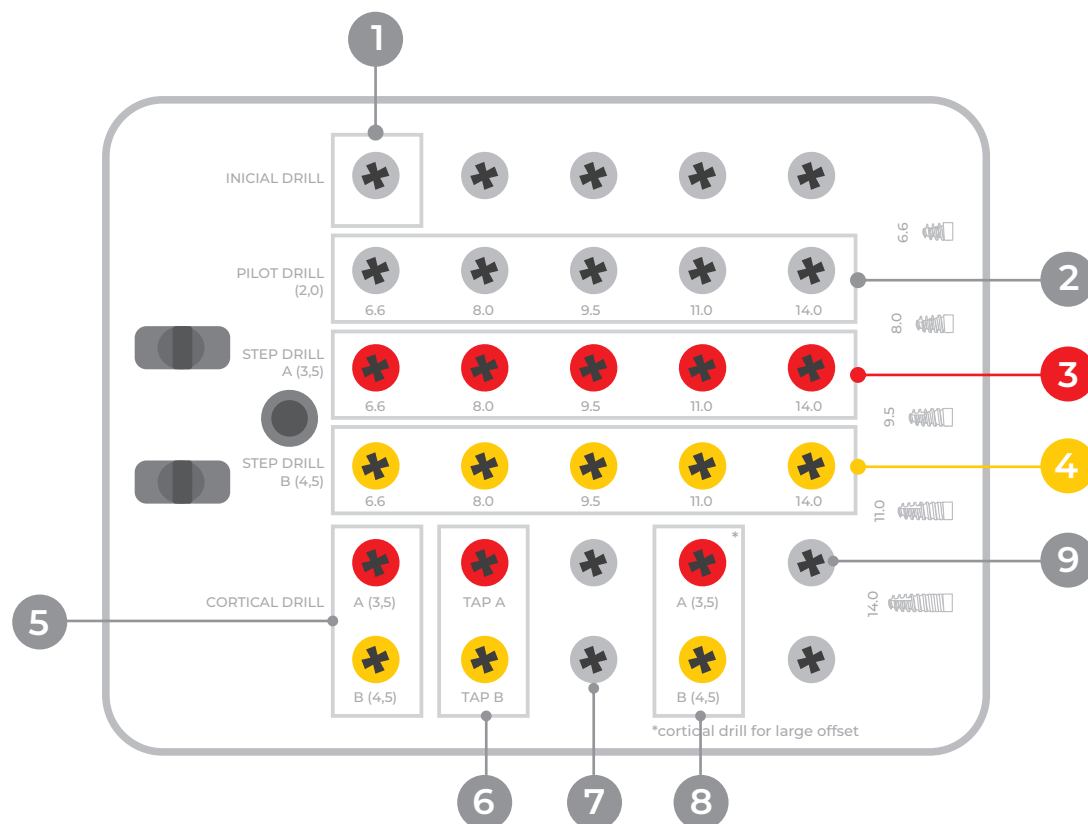

1 A2-NVG-14.01 ИНИЦИАЛЬНАЯ ФРЕЗА A2, навигационная

A2-NVG-14.02 ПИЛОТНАЯ ФРЕЗА A2, навигационная, 6,6 мм

A2-NVG-14.03 ПИЛОТНАЯ ФРЕЗА A2, навигационная, 8 мм

A2-NVG-14.04 ПИЛОТНАЯ ФРЕЗА A2, навигационная, 9,5 мм

A2-NVG-14.05 ПИЛОТНАЯ ФРЕЗА A2, навигационная, 11 мм

A2-NVG-14.06 ПИЛОТНАЯ ФРЕЗА A2, навигационная, 14 мм

A2-NVG-14.07 СТУПЕНЧАТАЯ ФРЕЗА A2, навигационная, A 6,6

A2-NVG-14.08 СТУПЕНЧАТАЯ ФРЕЗА A2, навигационная, A8

A2-NVG-14.09 СТУПЕНЧАТАЯ ФРЕЗА A2, навигационная, A9,5

A2-NVG-14.10 СТУПЕНЧАТАЯ ФРЕЗА A2, навигационная, A11

A2-NVG-14.11 СТУПЕНЧАТАЯ ФРЕЗА A2, навигационная, A14

A2-NVG-14.12 СТУПЕНЧАТАЯ ФРЕЗА A2, навигационная, B 6,6

A2-NVG-14.13 СТУПЕНЧАТАЯ ФРЕЗА A2, навигационная, B8

A2-NVG-14.14 СТУПЕНЧАТАЯ ФРЕЗА A2, навигационная, B9,5

A2-NVG-14.15 СТУПЕНЧАТАЯ ФРЕЗА A2, навигационная, B11

A2-NVG-14.16 СТУПЕНЧАТАЯ ФРЕЗА A2, навигационная, B14

A2-NVG-14.17 КОРТИКАЛЬНАЯ ФРЕЗА A2, навигационная
для имплантатов A, короткая

A2-NVG-14.19 КОРТИКАЛЬНАЯ ФРЕЗА A2, навигационная
для имплантатов B, короткая

A2-SRG-05.01 НАРЕЗЧИК РЕЗЬБЫ A2, под имплантаты A
A2-SRG-05.02 НАРЕЗЧИК РЕЗЬБЫ A2, под имплантаты B

A2-ORT-01.02 НАСАДКА ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ВИНТОВ-ЗАГЛУШЕК A2, длинная

A2-ORT-03.02 НАСАДКА-ОТВЕРТКА A2, шестигранная, 1,0, короткая


A2-ORT-05.01 РУКОЯТКА ДЛЯ НАСАДОК A2, узкая

A2-NVG-14.18 КОРТИКАЛЬНАЯ ФРЕЗА A2, навигационная
для имплантатов A, длинная

A2-NVG-14.20 КОРТИКАЛЬНАЯ ФРЕЗА A2, навигационная
для имплантатов B, длинная

A2-NVG-14.21 ИМПЛАНТОВОД A2, навигационный

A-ДИАМЕТР

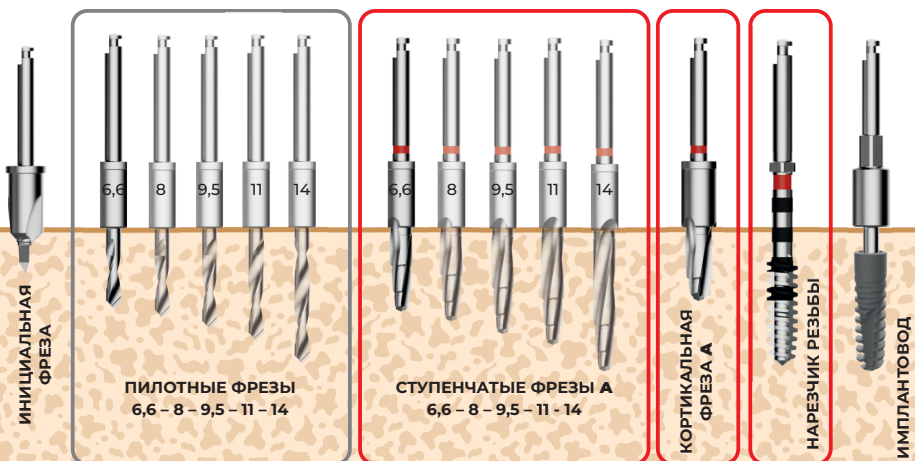

ПИЛОТНЫЕ ФРЕЗЫ
используйте
последовательно,
постепенно увеличивая
глубину сверления

СТУПЕНЧАТЫЕ ФРЕЗЫ A
используйте
последовательно,
постепенно увеличивая
глубину сверления

**КОРТИКАЛЬНАЯ
ФРЕЗА A**


**НАРЕЗЧИК
РЕЗЬБЫ A**
используйте
дополнительно
в плотной кости

МЯГКАЯ КОСТЬ D IV

КОСТЬ СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ D II-III

ПЛОТНАЯ КОСТЬ D I

B-ДИАМЕТР

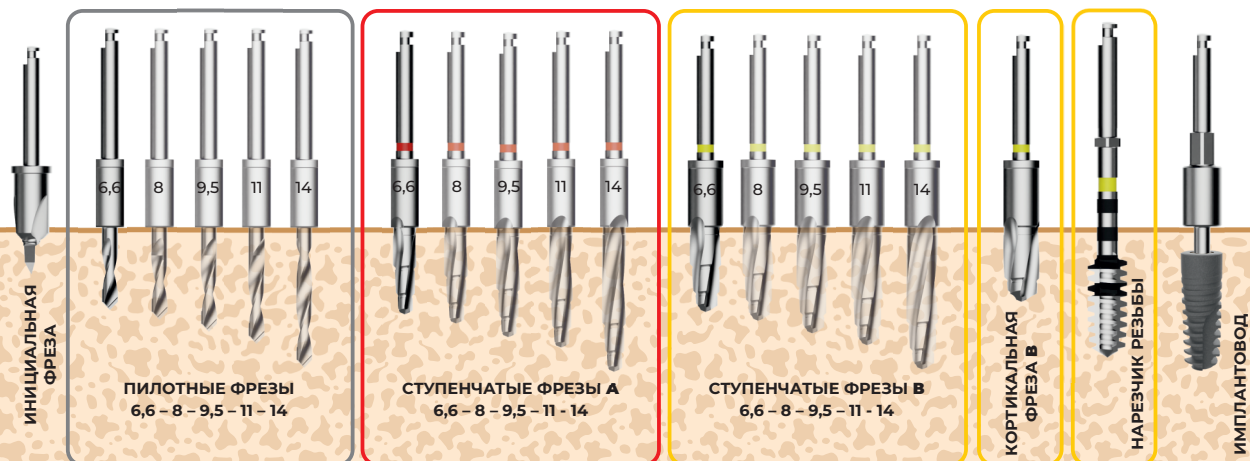

ПИЛОТНЫЕ ФРЕЗЫ
используйте
последовательно,
постепенно увеличивая
глубину сверления

СТУПЕНЧАТЫЕ ФРЕЗЫ A
используйте
последовательно,
постепенно увеличивая
глубину сверления

СТУПЕНЧАТЫЕ ФРЕЗЫ B
используйте
последовательно,
постепенно увеличивая
глубину сверления

**КОРТИКАЛЬНАЯ
ФРЕЗА A**

**НАРЕЗЧИК
РЕЗЬБЫ B**
используйте
дополнительно
в плотной кости

МЯГКАЯ КОСТЬ D IV

КОСТЬ СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ D II-III

ПЛОТНАЯ КОСТЬ D I